

APM-100

Manuale



A-Contenuto	2
--------------------	----------

B-Descrizione parti

Descrizione	3
Installazione	4

C-Impostazioni

Data e ora	6
Wi-Fi	8
Autospegnimento	9
Lingua	10


D-Applicazioni

Impostazioni	11
Registrazione cliente	12
Idratazione ed Elasticità	14
Sebo	15
Pori	17
Melanina	18
Acne / Impurità	19
Rughe	20
Sensibilità	21
Sommario	22


Supporto pc/tablet - mirroring	24
Come scaricare l'applicazione ARAMVIEWER	25

E-Risoluzione problemi	27
-------------------------------	-----------


Contenuto

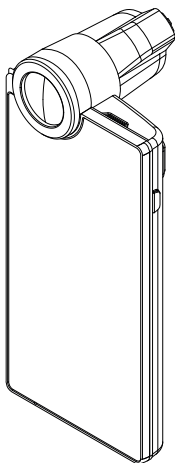


Parte principale con obiettivo

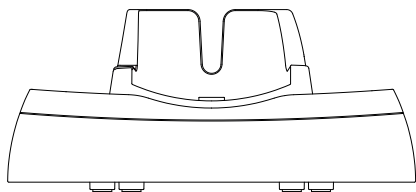


Base

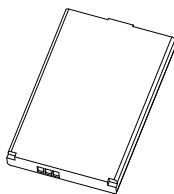


batteria (2 pz)

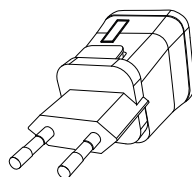


Caricabatterie

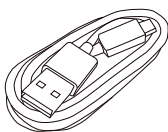

Cavo USB

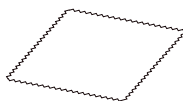

panno di pulizia

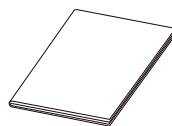


Manuale



Carte per sebo (2 conf.)




Tappo per lente

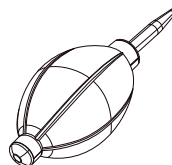

Areatore

Descrizione parti

Descrizione


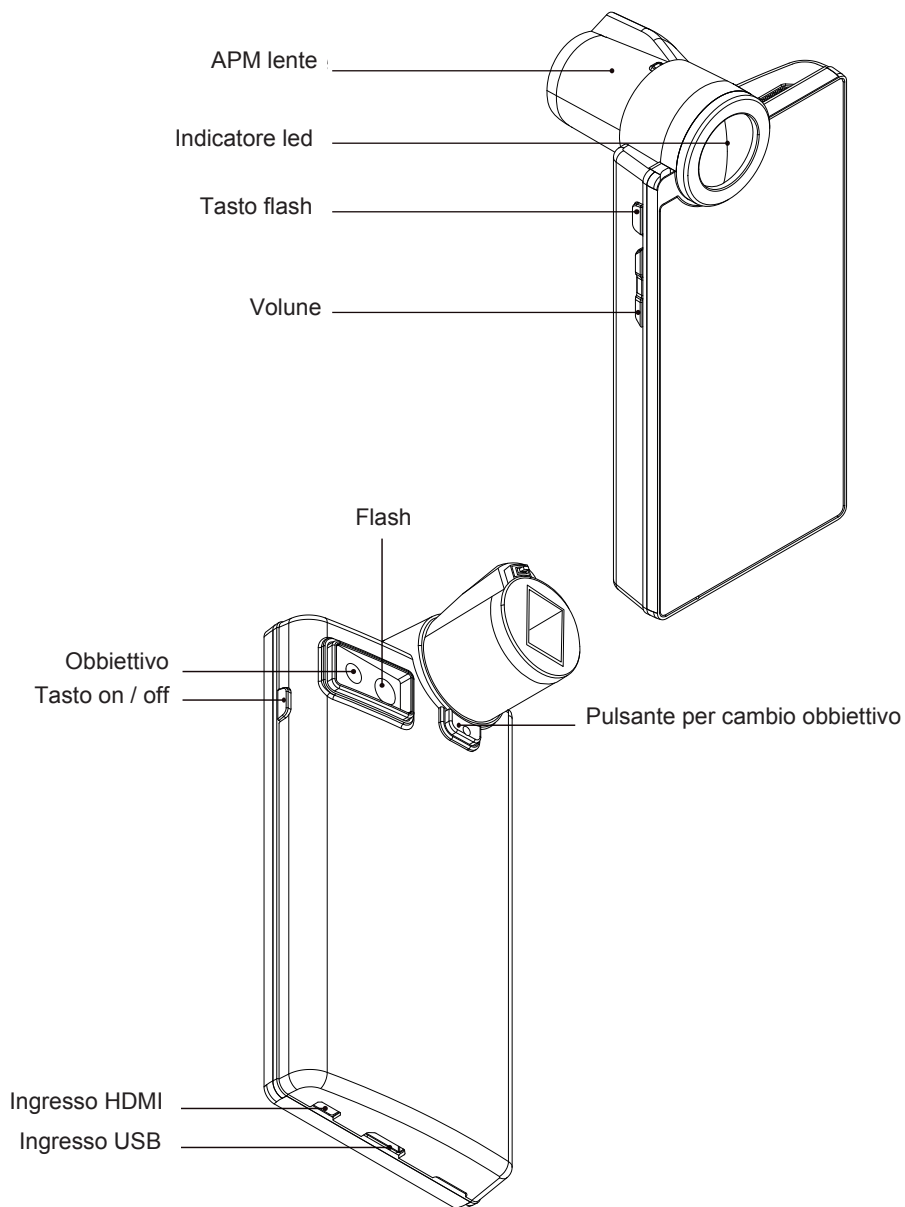


Descrizione parti

Installazione

Inserimento batteria

- 1- Aprire il vano batteria spingendo con un dito.
- 2- Inserire la batteria delicatamente rispettando la posizione.
- 3- Richiudere il coperchio.

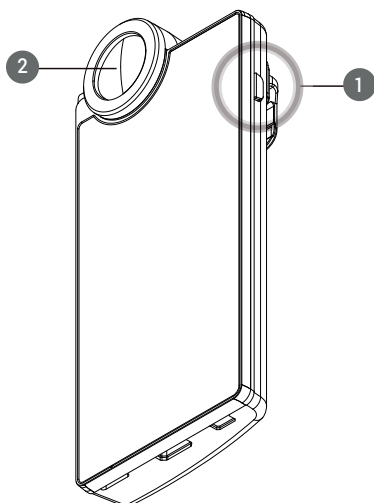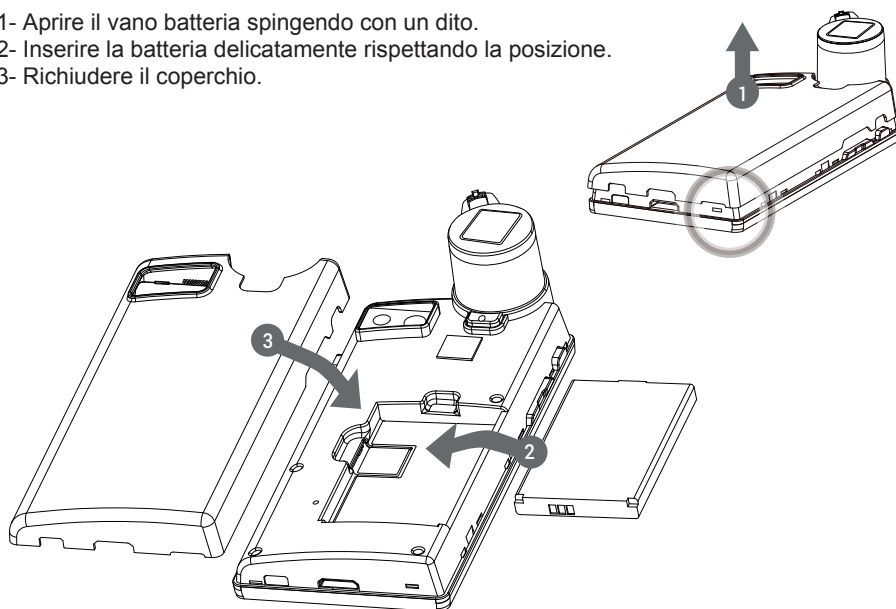

Accensione dispositivo

- 1- Premere il tasto e mantenere fin quando i led (2) non si accendono

Spegnimento dispositivo


- 1- Premere il tasto e mantenere fin quando i led (2) non si spengono

Descrizione parti


Installazione

Installazione carica batterie


- 1- Il carica batterie viene fornito con il riduttore per presa Europea

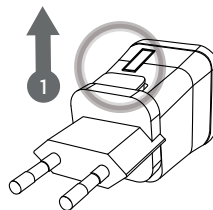

- 2- Per cambiare tipologia di spina sollevare la linguetta in plastica e sostituire.

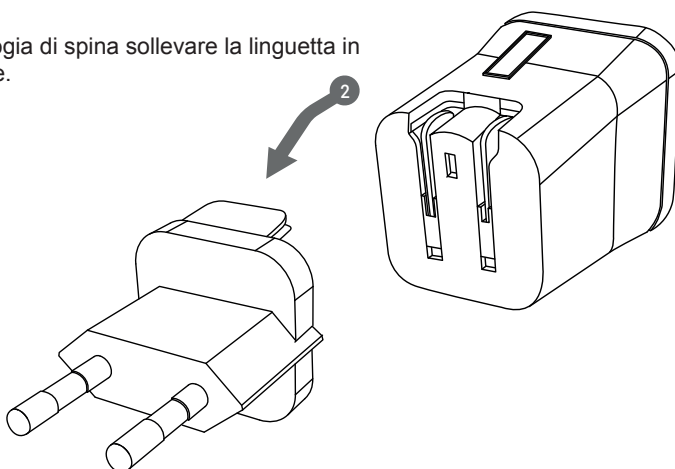


- 3- Collegare il cavo USB

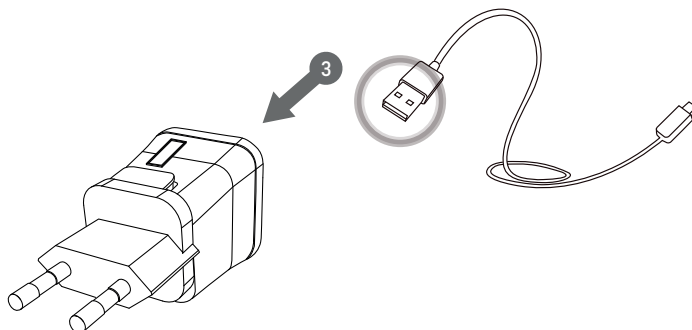


Impostazioni


Data e Ora

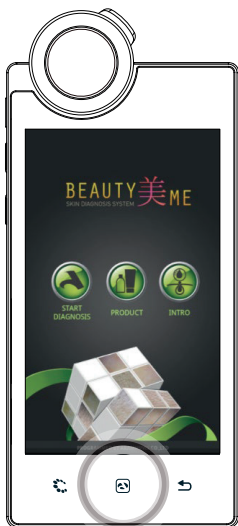


Premere il pulsante

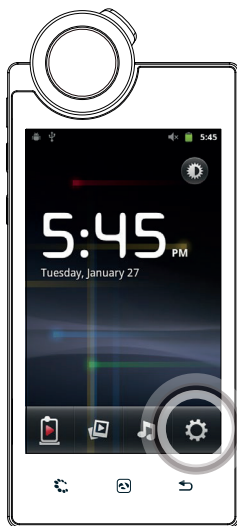


toccare impostazioni

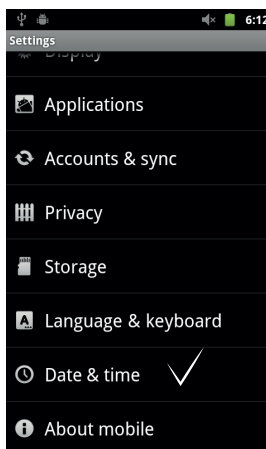


Selezionare data e ora

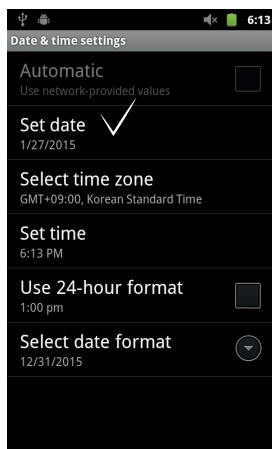

Selezionare imposta data

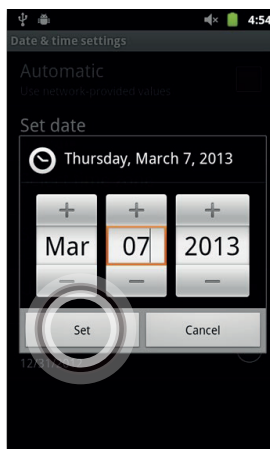

Impostare

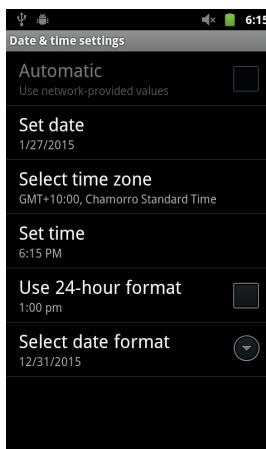


Verificare la corretta applicazione

Impostazioni

Data e ora


Modo Automatico

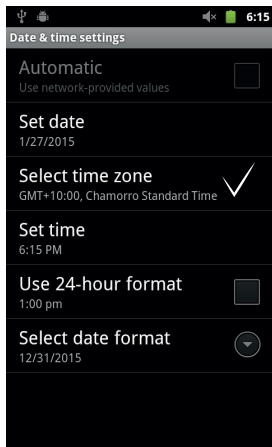

Selezionare time zone




Selezionare il fuso orario

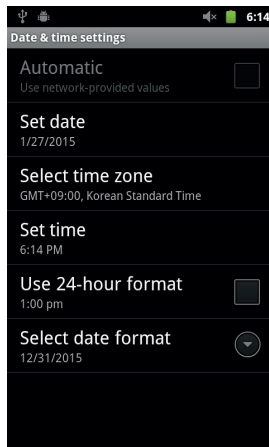


Controllare le corrette impostazioni


Modo manuale

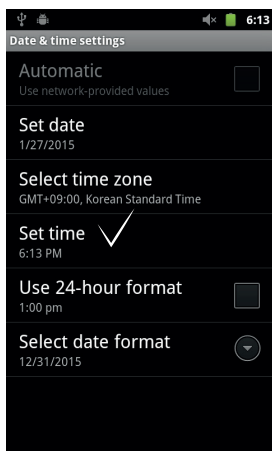

Selezionare imposta ora

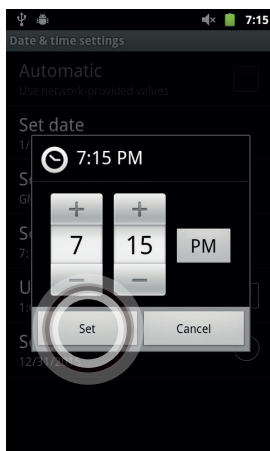


Impostare

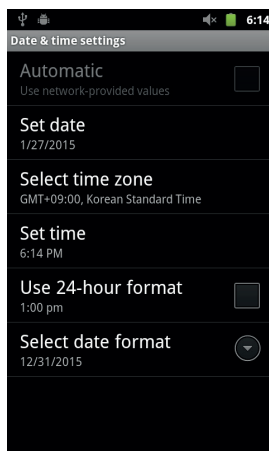

Controllare le corrette impostazioni

Impostazioni


Wi Fi

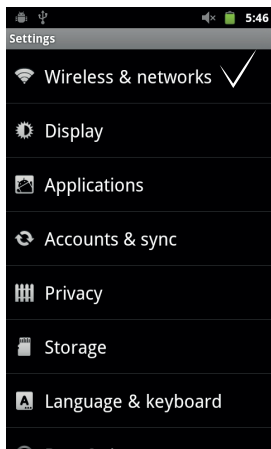


Selezionare reti wireless



Selezionare Wi fi settings

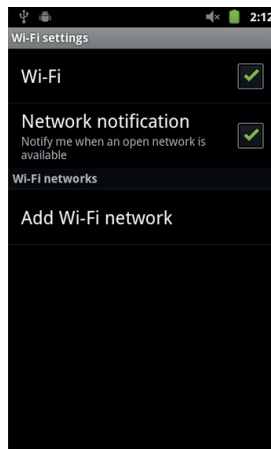


Selezionare le caselle

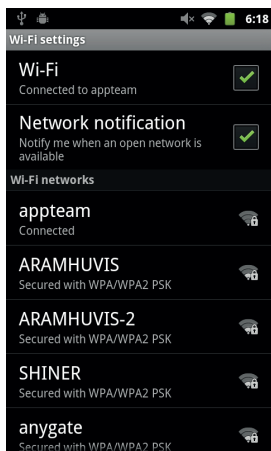

Apparirà la lista delle reti Wi Fi



Selezionare la vostra rete

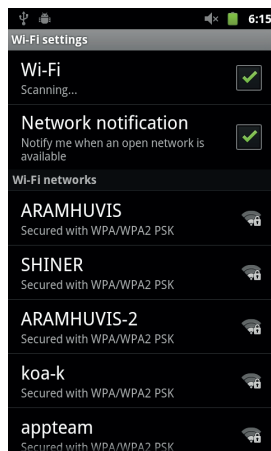

Attendere che il dispositivo si colleghi

Impostazioni

Wi Fi




Una volta che il dispositivo è collegato è possibile vedere il segnale come nell'immagine a sinistra


Importanza del collegamento Wi Fi

- 1- Per spedire i dati dell'analisi via mail
- 2- per ricevere gli aggiornamenti automatici del software


Autospengimento

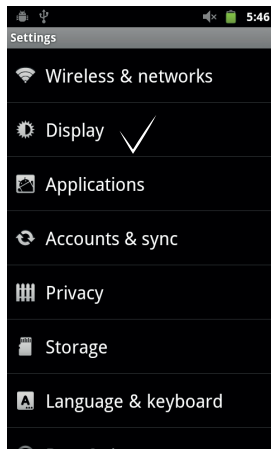

Selezionare Display

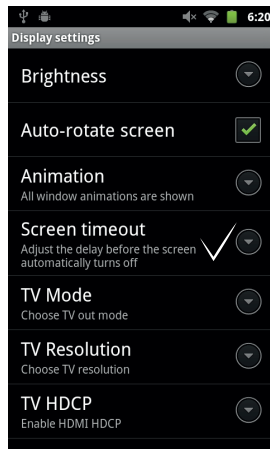


autospengimento

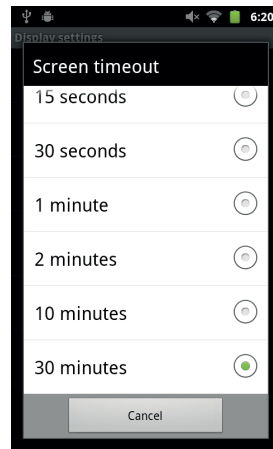

Impostare il tempo

Impostazioni


Lingua

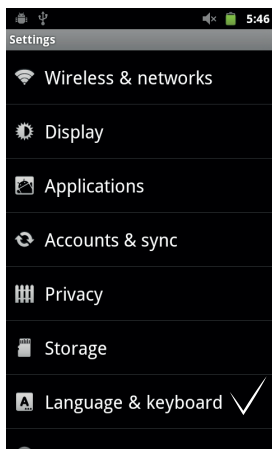

Selezionare lingua e tastiera




Toccare seleziona lingua

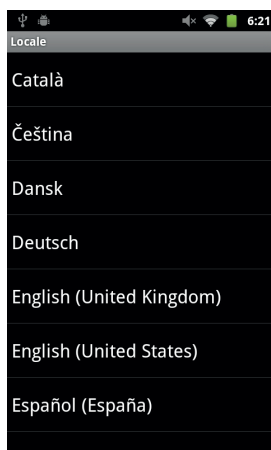


Scegliere la preferita

Applicazioni

Impostazioni

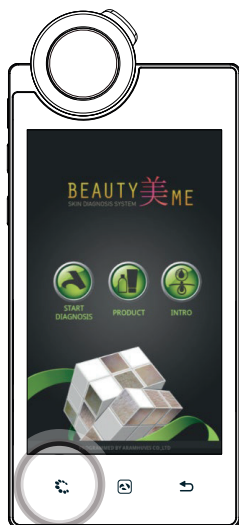

Premere il pulsante cerchiato

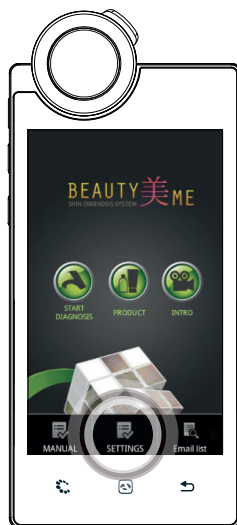


Selezionare settaggio



Selezionare tipo di pelle preferenziale e controllare/ambiare le altre impostazioni

Applicazioni


Registrazione cliente

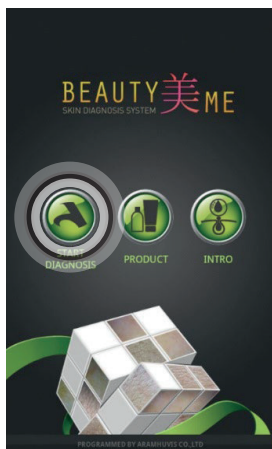


Toccare inizia diagnosi




Diagnosi completa

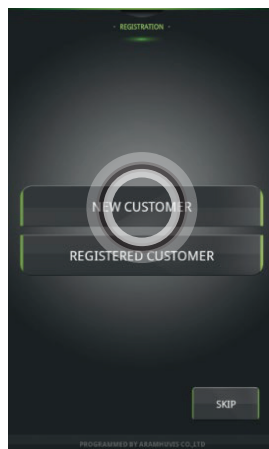


Nuovo cliente

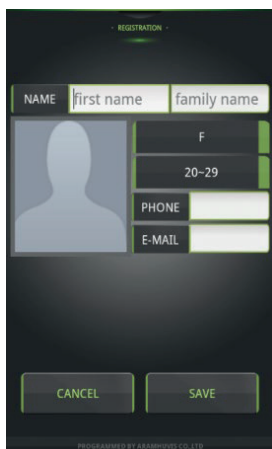

Inserire le informazioni
tutte le informazioni
richieste

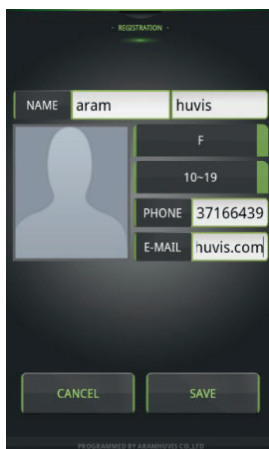

Salvare

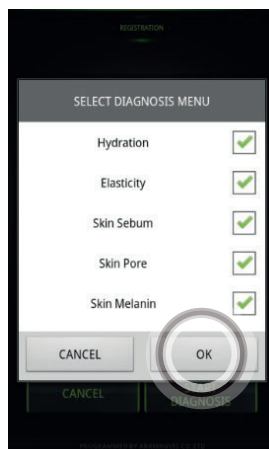

Selezionare le analisi
che faremo al nostro
cliente quindi premere
ok

Applicazioni


Analisi senza registrazione



Arrivati a questa schermata selezionare diagnosi semplice




Impostare sesso ed età

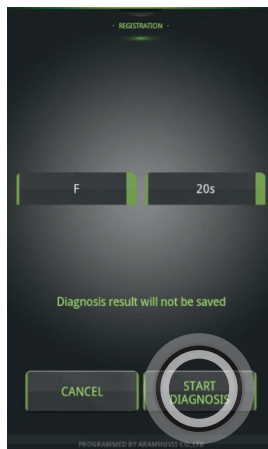


Inizia diagnosi

Applicazioni

Idratazione ed elasticità

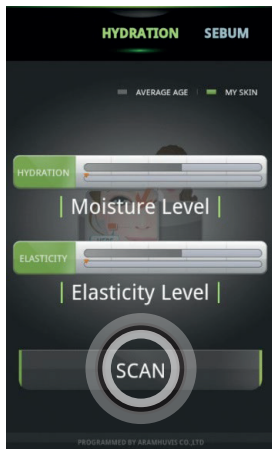


Premere il tasto camera, aspettare il suono, quindi appoggiare per 3 / 4 secondi il sensore su la pelle fino al nuovo suono

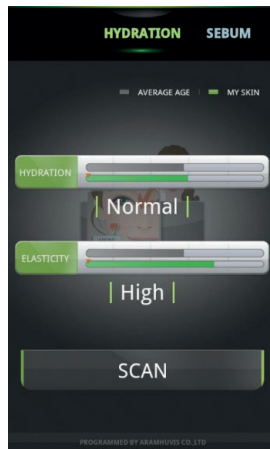


Attendere il risultato

Applicazioni

Sebo

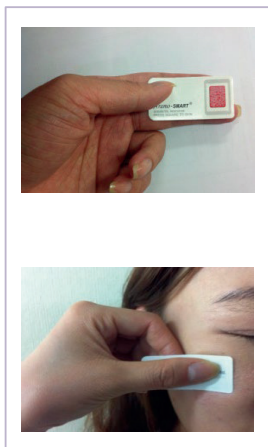


Toccare la carta per rilevare il sebo per 4 secondi nella zona a U

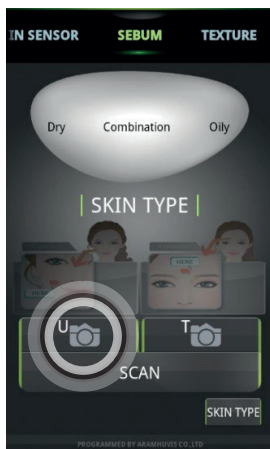

Toccare il tasto camera



Mettere a fuoco

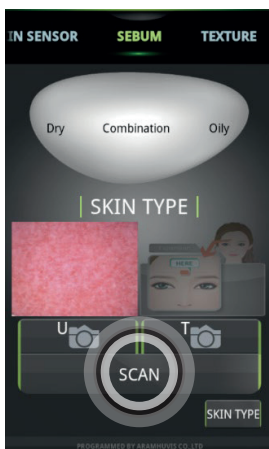

toccare tasto camera per fotografare




Toccare la carta e rilevare il sebo per 4 secondi nella zona a T




Mettere a fuoco

Applicazioni


Sebo

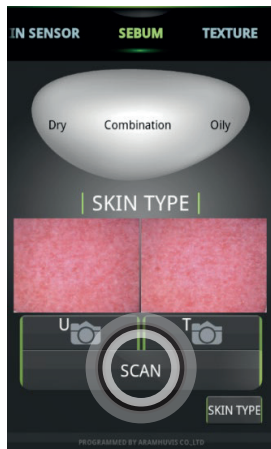

Toccare camera per fotografare

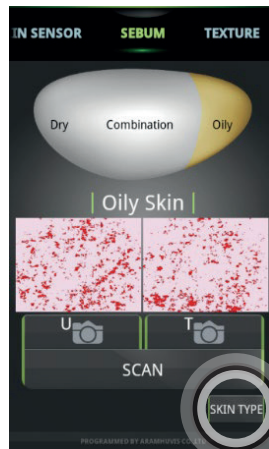


Toccare analizza

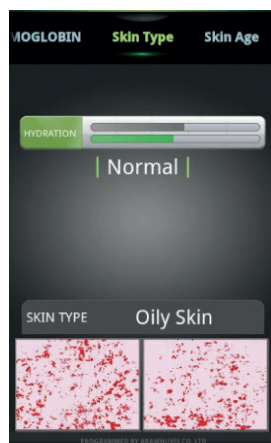


Controllare il risultato

Applicazioni

Pori

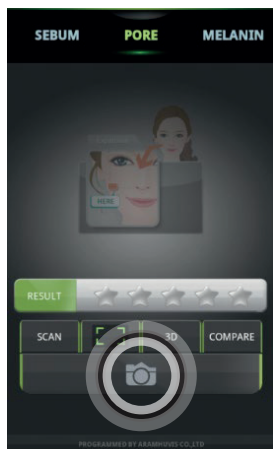


Toccare camera

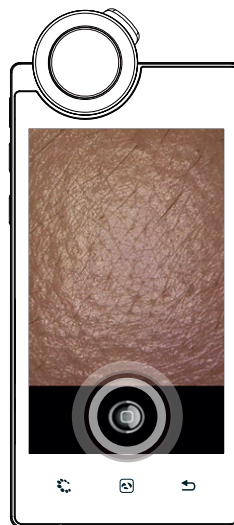

Premere per acquisire l'immagine




Premere analizza

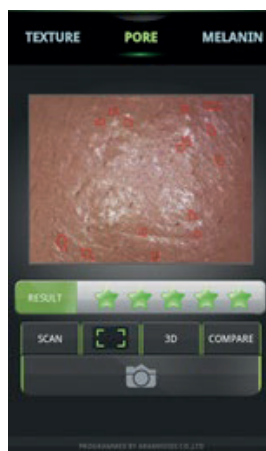

Controlla il risultato

Applicazioni

Melanina

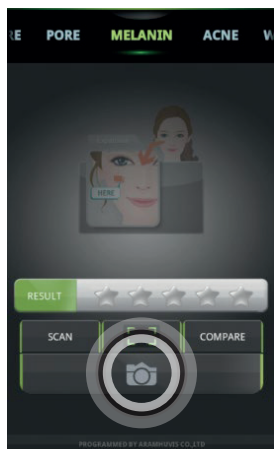


Toccare camera



Premere per acquisire l'immagine




Premere analizza

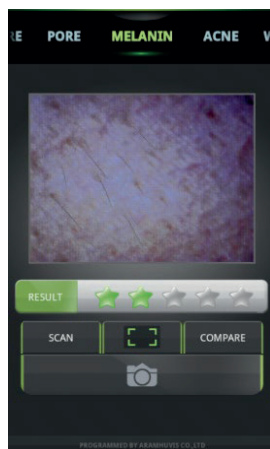


Controlla il risultato

Applicazioni


Acne / Impurità

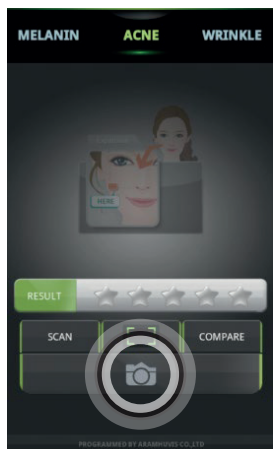

Toccare camera

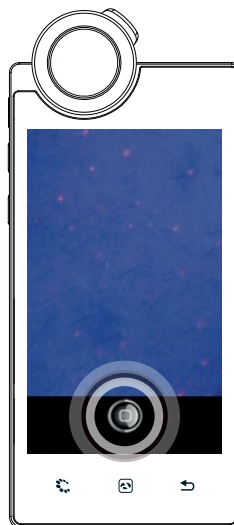

Premere per acquisire l'immagine

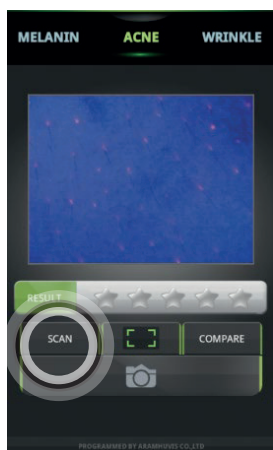


Premere analizza




Controlla il risultato

Applicazioni


Rughe

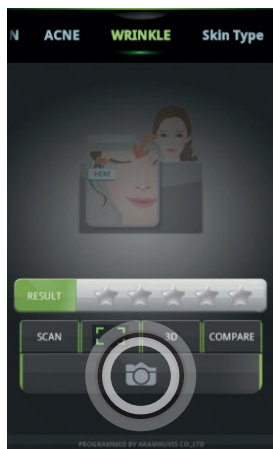


Toccare camera

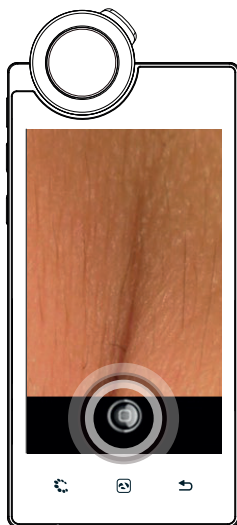


Premere per acquisire l'immagine

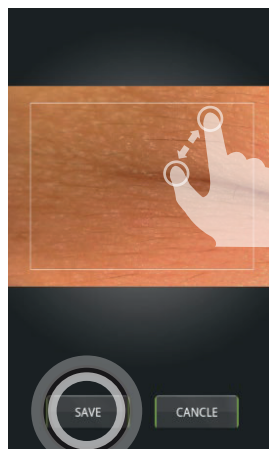

Scegli il punto da analizzare e salva

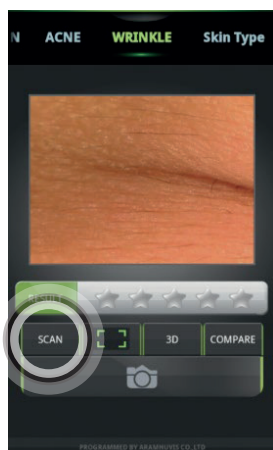


Premere analizza

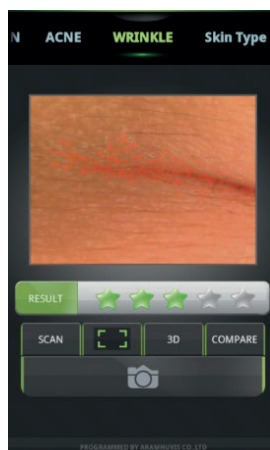

Controlla il risultato

Applicazioni


Sensibilità

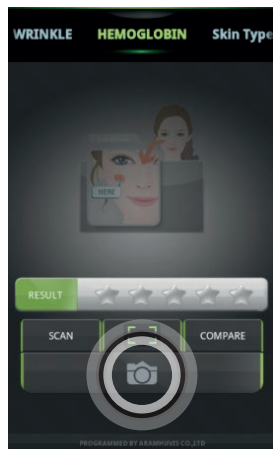


Toccare camera



Premere per acquisire l'immagine

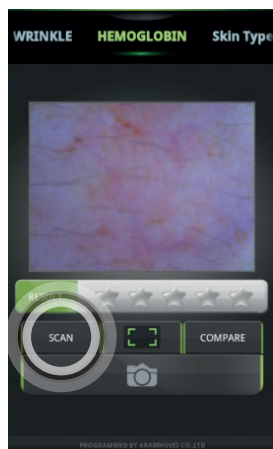


- Toccare analizza

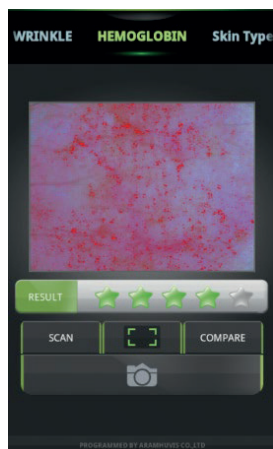

Controlla il risultato

Applicazioni


Sommario

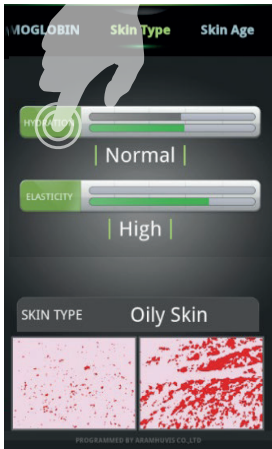

Toccare idratazione o elasticità




Premere diagnosi

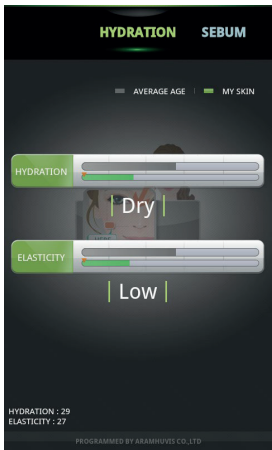


Controllare il risultato

Applicazioni


Sommario

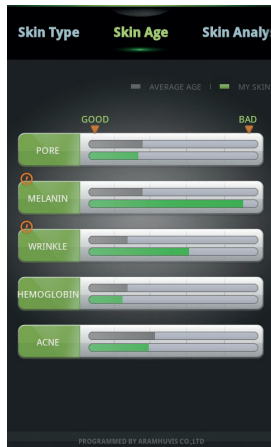


Toccare ciò che si vuole controllare

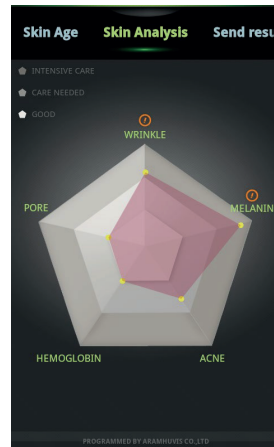

Il punto ! significa che è il risultato peggiore

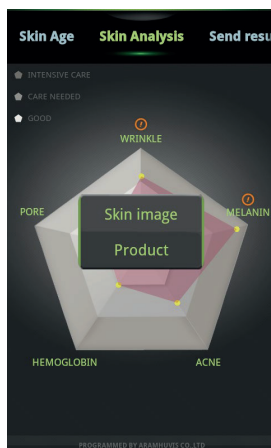


Toccare ogni analisi per vedere l'immagine e i prodotti consigliati

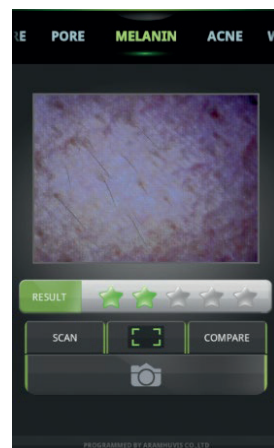


Controllo il risultato della singola diagnosi

Applicazioni


Supporto pc/tablet - mirroring

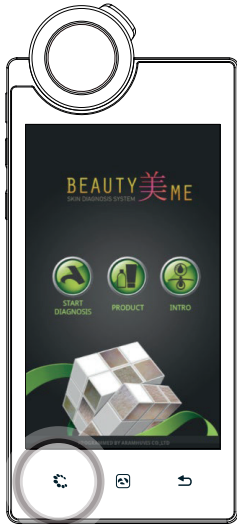


Premere il tasto

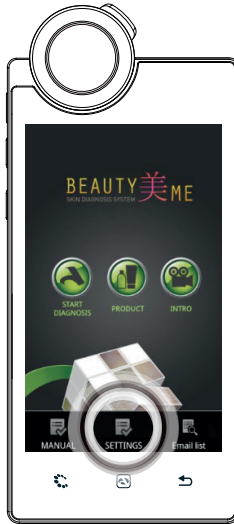


Premere il tasto

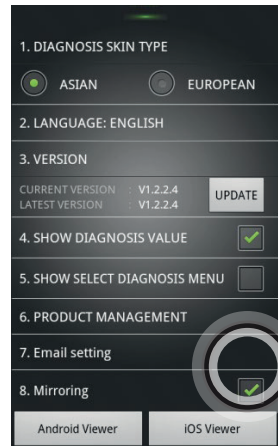


Selezionare Mirroring

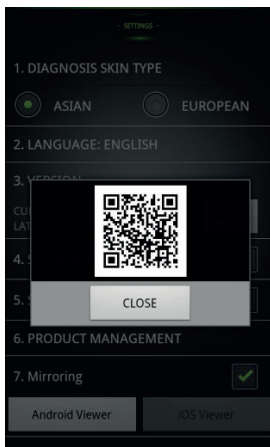

Con il vostro tablet / pc inquadrare il codice Qr e verrà installato il programma diversamente scaricatelo dal sito www.aramhuvis.com o da App store - Aram viewer

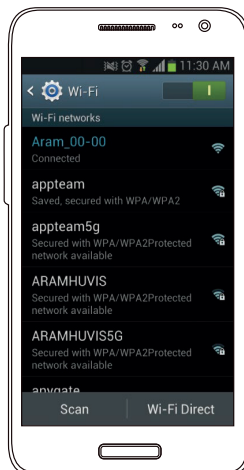

Andate su impostazioni del tablet / pc , quindi Wi fi e selezionate Aram

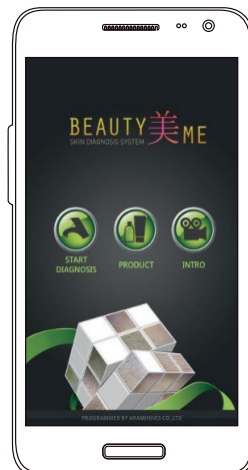

I dispositivi sono collegati, aprendo il programma Aram viewer.

INTEGRAZIONE AL MANUALE DI “APM”

- **Come scaricare l'applicazione “ARAM VIEWER”.**

Schema passo – passo per dispositivi “ANDROID”.

- 1- Sul dispositivo Android (tablet/smartphone), aprire “Play Store”.
- 2- Selezionare cerca su Play Store e digitare “ARAM VIEWER”
- 3- Selezionare l'applicazione e scaricare.

Schema passo – passo per dispositivi “iOS”.

- 1- Sul dispositivo iOS (iPad/iPhone), aprire “App Store”.
- 2- Selezionare cerca su App Store e digitare “ARAM VIEWER”
- 3- Selezionare l'applicazione e scaricare.

Schema passo – passo per dispositivi Windows

- 1- Con il dispositivo con sistema operativo Windows, (smartphone/tablet/pc), andare sul sito web:
www.aramhuvis.com
- 2- Quindi nella lista delle scelte selezionare “Supporto” e dopo “download”.
- 3- Scegliere il programma “ARAM VIEWER”
- 4- Scegliere l'opzione Windows, il dispositivo inizierà a scaricare.

Schema passo – passo per dispositivi Mac

- 1- Con il dispositivo con sistema operativo Mac, andare sul sito web:
www.aramhuvis.com.
- 2- Quindi nella lista delle scelte selezionare “Supporto” e dopo “download”.

- 3- Scegliere il programma “ARAM VIEWER”
- 4- Scegliere l’opzione Mac, il dispositivo inizierà a scaricare.

Collegamento di APM all’applicazione.

- 1- Accendere il dispositivo e aspettare che concluda il processo di accensione e autodiagnosi.
- 2- Quando sul display sono visibili le 3 opzioni: inizio diagnosi, prodotti e video, premere il tasto di sinistra posto in basso sotto il display.
- 3- Sul display apparirà la scritta “settaggio”, selezionarla con un tocco.
- 4- Adesso selezionare il punto numero 8 “Mirroring”, (dovete scorrere il display verso l’alto), deve comparire il nome della rete Wi-Fi generata, ad esempio: Aram 6686
- 5- Con il tasto a destra posto sotto il display tornare all’immagine iniziale, del punto 2.

Collegamento APM ai dispositivi esterni.

- 1- Sull’interfaccia esterna (smartphone, iPhone, Tablet, iPad, Pc), aprire reti Wi-Fi.
- 2- Selezionare la rete di nome Aram...., e connettersi.
- 3- Aprire il programma Aram Viewer, quindi premere “START”, i due dispositivi sono collegati.

Risoluzione dei problemi

1) Il dispositivo non si accende

Controllare lo stato di carica della batteria, all'evenienza collegarlo direttamente al caricabatterie in dotazione.

2) il dispositivo non si accende anche con batteria carica

Togliere la batteria e ri-inserirla

3) La batteria non carica molto bene

Controllare ce non ci siano impedimenti tra batteria e carica batteria

4) Il dispositivo si accende ma la diagnosi non funziona

Controllare che la smart card nel vano batteria sia inserita correttamente

5) Il dispositivo è sporco

Pulire esclusivamente con il panno in dotazione

6) Lo schermo è bloccato

Togliere la batteria e ri-metterla , se il problema persiste contattare l'assistenza

7) Sul monitor c'è un simbolo di forza.

Aspettare che il dispositivo abbia completato i comandi precedenti

8) Non è possibile connettersi al Wi Fi

Provare a re impostare il Wi Fi o provare un'altra rete Wi Fi

9) Il touch screen non reagisce ai comandi

Se c'è la pellicola protettiva toglierla, o provare a togliere la batteria e ri- metterla

10) Non si collega tramite Bluetooth

Il numero da inserire è "0", i dispositivi sono lontani, e non tutti i dispositivi lo si possono collegare in assenza di un'autorizzazione Ufficiale Apple's

11) Lo schermo si è spento

il dispositivo ha un autospegnimento dopo 1 min, premere on/off per riaccendere, per variare impostazione andare a pagina 8

12) Durante la misurazione ho lo schermo nero

Controllare che i led interni all'obiettivo si accendano, provare a togliere e rimettere l'obiettivo, se il problema persiste contattare l'assistenza.

13) l'immagine non è chiara

Toccare l'obiettivo per mettere a fuoco

14) Non è possibile ricevere aggiornamenti

Controllare la connessione di rete Wi Fi

Risoluzione dei problemi

10 Il touch screen non reagisce ai comandi.

Se si utilizza per la prima volta il dispositivo, assicurarsi che non ci sia più la pellicola di protezione

11 Non riesco a connettermi con il bluetooth

Assicurati di utilizzare dispositivi con bluetooth certificato da logo. Per accompagnare due dispositivi accendere il bluetooth da entrambi e avvicinarli.

Il numero di accoppiamento è 0.

Non è possibile accoppiare con IOS perchè è necessaria un autorizzazione da APPLE

12 Lo schermo si spegne

Premere il pulsante On/ Off per accendere lo schermo, il dispositivo ha la funzione di risparmio energetico che spegne lo schermo dopo 1 minuto. Per l'impostazione vai a pagina 8

13 Lo schermo nero si può vedere soltanto durante la misurazione

Controllare la luce led all'interno della parte principale del dispositivo. Se non si vede alcuna luce contattare il servizio clienti tramite mail o per telefono

14 L'immagine non è chiara

Tocca lo schermo durante la messa a fuoco

15 Non è possibile aggiornare l'applicazione della diagnosi

Controlla la connessione di rete, il processo di aggiornamento può essere fatto solo dopo la connessione al Wifi



Via Regina Pacis, 74 - 41049 Sassuolo (MO) - tel. 0536.801554 - fax 0536.805626
info@mbdivisionecosmetica.it - www.mbdivisionecosmetica.it